



## KIT DE DÉPART

- 1 TOUR DE TÊTE
- 1 CASQUETTE
- 1 FEUILLE DE PROTECTION



1. Prenez le composant 1 afin de former le tour de tête réglable.

**Astuce sens de montage:**  
Les crans permettant de bloquer le composant 2 lors des manipulations doivent être vers le bas.




2. Clipsez le composant 2 au composant 1 en l'insérant par l'arrière. Assurez-vous que la partie creuse du composant 2 soit face à vous lors de la manipulation et qu'elle reste au-dessus de la partie servant à régler le tour de tête.

**Astuce de montage:**  
Les composants sont souples. N'hésitez pas à les plier légèrement pour que les embouts coïncident.

3. Faites basculer le composant 1 vers l'avant jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire.

**Note:**  
Lors de la manoeuvre, vous aurez une légère résistance et vous entendrez un clic sec au départ vous signifiant que le composant 2 est enclenché.

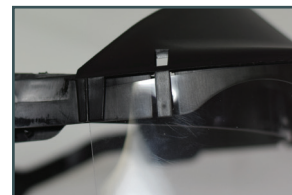

4. Faites glisser la feuille en vous assurant que les encoches de celle-ci soient en dessous des clips.



5. Mettez la V.P.I. sur le côté, afin d'accéder aux languettes de la feuille se trouvant derrière. Remontez-les pour éviter que la feuille ne glisse.



Pièce entièrement assemblée.

## VISIÈRE AVEC 3 POSITIONS DE BLOCAGE



PARFAITE TRANSPARENCE



COMPATIBLE AVEC LE PORT DE LUNETTE



ADAPTÉ AU PORT D'UN MASQUE

## NETTOYAGE DU PRODUIT

Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.

Mode opératoire :

- Démontez la visière du support.
- Laver la visière et le support avec un tissu microfibre pour ne pas rayer l'écran, en utilisant de l'eau savonneuse.
- Remonter la visière sur le support.
- Se laver les mains après l'opération.

Stocker le produit lorsqu'il n'est pas utilisé à l'abri de la poussière, d'une flamme ou d'une source de chaleur (matériau inflammable).

*Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n'est pas une visière à usage général et ne doit pas être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège le porteur contre des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, mais ne protège pas des particules en suspension.*

*Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates. L'utilisateur doit contrôler lors du montage initial ou du remontage après nettoyage, l'absence de défaut sur la visière (fissures, rayures), ou le support (déchirure). Toute visière abîmée (trou, déchirure, fissure), doit être changée. L'ancienne visière doit être désinfectée ou lavée avant d'être jetée avec les plastiques ménagers (matière PET recyclable).*

R8.01 - COVID19, EPI catégorie III, Classe optique 3.