



KIT DE DÉPART

- 1 SUPPORT VISIÈRE
- 1 FEUILLE DE PROTECTION




PARFAITE TRANSPARENCE



COMPATIBLE AVEC LE PORT DE LUNETTE



ADAPTÉ AU PORT D'UN MASQUE

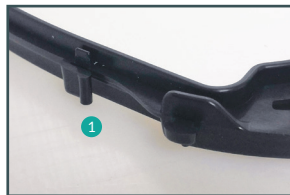

1. Prenez le support de la feuille de protection en vous assurant d'avoir la partie dentelée avec les logos visibles.

2. Faites glisser le coin supérieur de la feuille dans la partie ①. Puis, faites coïncider la première encoche présente sur la feuille avec le premier des 4 embouts du support.

Astuce de montage:
La partie la plus courte de la feuille de protection doit être du côté dentelé avec les logos visibles.



3. Une fois la première encoche entrée, faites entrer les autres en prenant le temps de mettre l'autre coin supérieur de la feuille dans la partie ①.

4. L'opération terminée, remontez les languettes présentes sur la feuille de protection au niveau des embouts afin d'éviter qu'elle ne glisse.

Pièce entièrement assemblée.

NETTOYAGE DU PRODUIT

Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.

Mode opératoire :

- Démontez la visière du support.
- Lavez la visière et le support avec un tissu microfibre pour ne pas rayer l'écran, en utilisant de l'eau savonneuse.
- Remontez la visière sur le support.
- Se laver les mains après l'opération.

Stocker le produit lorsqu'il n'est pas utilisé à l'abri de la poussière, d'une flamme ou d'une source de chaleur (*matériau inflammable*).

Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n'est pas une visière à usage général et ne doit pas être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège le porteur contre des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, mais ne protège pas des particules en suspension.

Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates. L'utilisateur doit contrôler lors du montage initial ou du remontage après nettoyage, l'absence de défaut sur la visière (fissures, rayures), ou le support (déchirure). Toute visière abîmée (trou, déchirure, fissure), doit être changée. L'ancienne visière doit être désinfectée ou lavée avant d'être jetée avec les plastiques ménagers (matière PET recyclable).

R8.01 - COVID19, EPI catégorie III, Classe optique 3.