



mdose
by Multiroir

Automate Celia - Software

Impressions écrans

www.mdose.fr

www.mdose-pda.fr



[Ocelia - Le remplisseur automatique de pilulier.mp4](#)

Mdose – Automate Celia

Ecran d'accueil – Traçabilité et sécurité

Sécuriser par un mot de passe - Tracer par un code identifiant



Mdose – Automate Celia

Ecran d'accueil – Choix de la structure à préparer : mes EHPAD / mon officine



Mdose – Automate Celia

Ecran d'accueil – Ecran d'accueil de la structure choisie

The screenshot displays the OCelium R1 software interface. At the top, the title "OCelium R1" is prominently displayed. Below the title is a horizontal navigation bar with eight icons and their corresponding labels: ORDONNANCEUR, ROBOT REMPLISSEUR, REMPLISSAGE EXCEPTIONNEL, PATIENTS ET PRESCRIPTEURS, HISTORIQUE, GESTION DE STOCK, CONFIGURATION, and CHANGER DE STRUCTURE. The main content area is divided into two information panels. The left panel, titled "Informations sur le dossier", includes a house icon and details such as "Type: Structure médicalisée", "Nom: EHPAD St Nicolas", "Nombre de semaines de décalage: 0 semaine(s)", "Premier jour de prise: lundi", and "Nombre de semaines à remplir en une fois: 1 semaine(s)". The right panel, titled "Informations sur la pharmacie", features a green cross icon and lists details like "Nom: Pharmacie OCelium", "Adresse 1: 1 rue du long douet", "Adresse 2: 14760 Bretteville sur Odon", "Téléphone: 0972153389", "Télécopie:", "FINESS: 65328491", "Pharmacien(s): JUMELIN - DORSON", and "Utilisateur connecté: pharma". In the center of the interface, the "W2Next beyond the pill" logo is visible.

Mdose – Automate Celia

Préparation du plan de remplissage : Liste des patients à préparer pour un EHPAD

Liste des clients du PDR de la semaine 38 à 38
du 17-09-2018 au 23-09-2018

Sélectionner un patient pour commencer le remplissage du pilulier :

Patient associé au PDR	Cartouches	Molécules	Nombre d'unités à distribuer	Type de pilulier	Semaine(s)	
MARGUERIE Vincent	4	6	112	M-Dose	38	Démarrer le remplissage

Liste des patients à préparer dans le plan de charge

Historique du PDR courant :

Patient associé au PDR	Type de semainier	Du	Au	Semaine	Statut	Identifiant du fichier
Aucun patient associé...						


Terminer

Mdose – Automate Celia

Préparation du plan de remplissage : validation du traitement avant remplissage

	Lun - 17/9	Mar - 18/9	Mer - 19/9	jeu - 20/9	Ven - 21/9	Sam - 22/9	Dim - 23/9
matin	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg	1 STAGID 700 mg
	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg
	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg	1 TERCIAN 25 mg
	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml	8 ZYRTEC 10 mg/ml
midi	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg
soir	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg	1 DAFALGAN 500 mg
	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...	2 PROPRANOLOL BIOGARAN 40...
coucher	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg	1 BETAHISTINE EG 8 mg

Traitement complet



MARGUERIE Hélène
(1/1)

Traitement du 17-09-2018 au
23-09-2018
semaine 38

Vérification de l'ordonnance
En blanc : dans le pilulier
En jaune : en dehors
Possibilité de modifications

← précédent
suivant →
Retour au support
Modifier le traitement
Valider le traitement

Mdose – Automate Celia

Préparation du plan de remplissage : modification du traitement

Gestion des ordonnances

Ordonnance #416 de MARGUERIE Hélène

Date de l'ordonnance : 20/08/2018
Date de début de traitement : 20/08/2018
Date de fin : 2018-09-16 (indicatif)
Prescripteur : Dr. CARLIER CARLIER
Pré-configuration de la durée des prescriptions : 28 jour(s)

Type d'ordonnance: Chronique Aiguë

AJOUTER UNE PRESCRIPTION +

stag

CYSTAGON 50 mg, gélule
SOLUTION STAGO DILUEE, solution buvable en flacon
CYSTAGON 150 mg, gélule
STAGID 700 mg, comprimé sécable

	Medicament	Unité(s)	Date Début	Pendant	Jour(s) de la semaine	Horaire(s)	Fract.	Déiv.	Recon.	Si Be.	Act.
1	STAGID 700 mg, comprimé séca...	1 Cpr	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	matin	Non	Oui	Oui	Non	---
2	DAFALGAN 500 mg, gélule	1 Gel	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	matin midi soir	Non	Oui	Oui	Oui	---
3	TERCIAN 25 mg, comprimé poli c...	1 Cpr	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	matin	Non	Oui	Oui	Non	---
4	DEPAKOTE 500 mg, comprimé g...	1 Cpr	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	midi	Non	Oui	Oui	Non	---
5	ZYRTEC 10 mg/ml, solution buva...	8 Gou	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	matin	Non	Oui	Non	Non	A jour
6	MEDIATENSYL 60 mg, gélule	2 Gel	Lun. 20 août 2018	28 jours	tous les jours	soir	Non	Oui	Oui	Non	---

Suppr. Modifier

Dans le plateau: En dehors du plateau Non formé Dépose manuelle Prescription non valide

Valider l'ordonnance Abandonner les modifications

Ex : ajout d'une ligne de prescription par saisie ou scan du Datamatrix

Type d'ordonnance: Chronique Aiguë

AJOUTER UNE PRESCRIPTION +

stag

CYSTAGON 50 mg, gélule
SOLUTION STAGO DILUEE, solution buvable en flacon
CYSTAGON 150 mg, gélule
STAGID 700 mg, comprimé sécable


v.	Recon.	Si Be.	Act.	
Oui	Non	---	---	
Oui	Oui	---	---	
Oui	Non	---	---	Suppr. Modifier
Oui	Non	---	---	Suppr. Modifier

Mdose – Automate Celia

Préparation du plan de remplissage : modification du traitement


Configuration intuitive du rajout de traitement

Editeur de prescription
Configuration du traitement de MARGUERIE Hélène







Médicament à délivrer : **STAGID 700 mg, comprimé sécable** substituable : Prescrit :  **Déliverable** Non délivrable **Reconditionnable** Non reconditionnable Selon protocole A M S R

1 x 1/2 comprimé(s) matin midi soir coucher Modalité de prise pendant 10 jour(s)
tous les jours sélectionnés - Commencer au 20/08/2018 - Si besoin Commentaire :


Jours de prise sélectionnés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Heures de prise : midi, soir, 14h30




Plan de posologie : plan séquentiel

Unité(s)	Fraction	Jour(s) de la semaine	Durée	Horaire(s)	Commentaire	Si besoin	Du	Au	
1	Non	tous les jours	28 jours	matin		Non	Lun. 20 aout 2018	Dim. 16 septembre 2018	  
1	1/2	Ven. Mer.	10 jours	midi soir 14h30		Non	Lun. 17 septembre 2018	Mer. 26 septembre 2018	  


Annuler Valider le plan de posologie

BASE DE DONNÉES PUBLIQUE DES MÉDICAMENTS
Visiter [medicaments.gouv.fr] 
Dernière mise à jour le 07/08/2018

Fiche info **Résumé des caractéristiques du produit** Notice


STAGID 700 mg, comprimé sécable 
Date de l'autorisation : 12/08/1996

Cliquez sur un pictogramme pour aller directement à la rubrique le concernant. Pour plus d'information sur les pictogrammes, consultez [L'aid](#).

Informations importantes 
Les informations importantes disponibles pour ce médicament sont les suivantes :

Mdose – Automate Celia


Lancement de la production : optimisation des chargeurs de médicaments

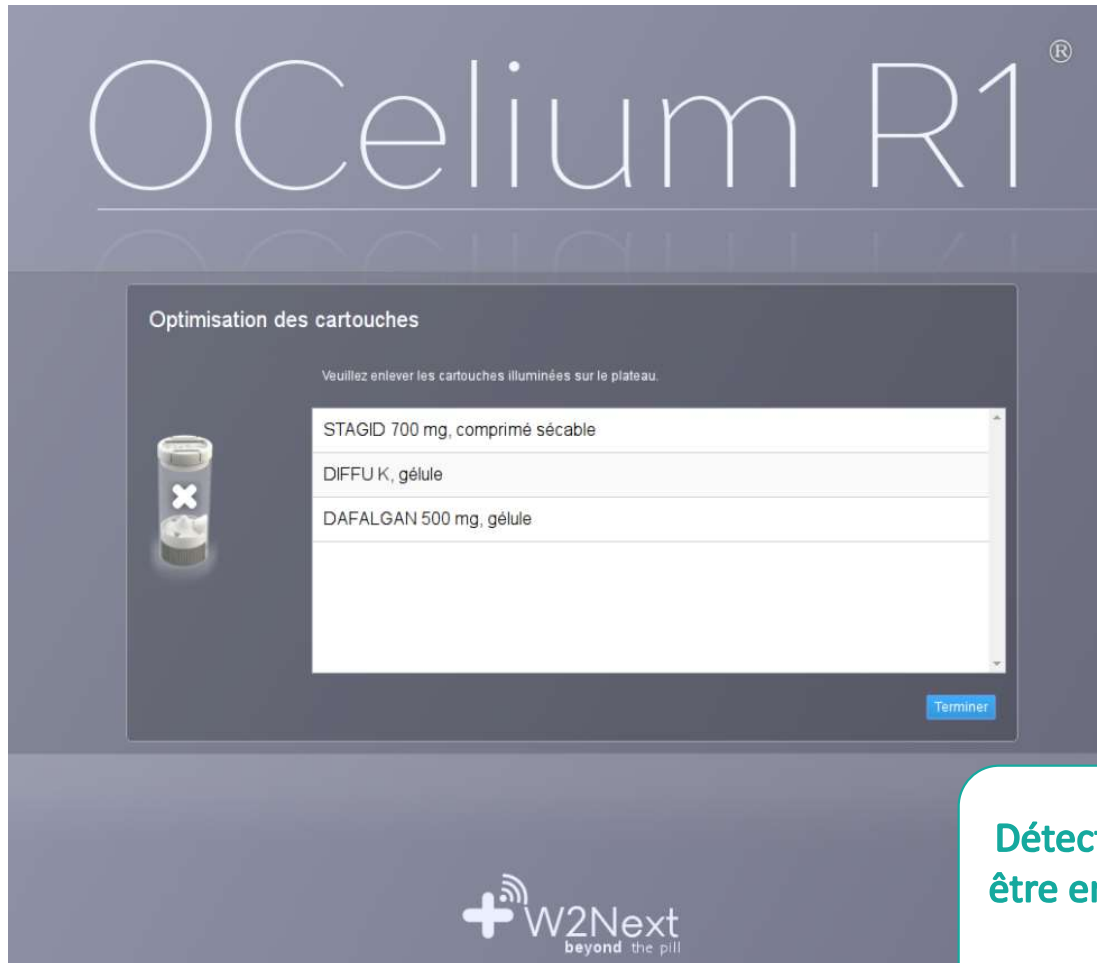

Détection des chargeurs inutiles qui doivent être enlevés si besoin de place sur le plateau (lumière violette sur le plateau)

Mdose – Automate Celia

Lancement de la production : optimisation des chargeurs de médicaments

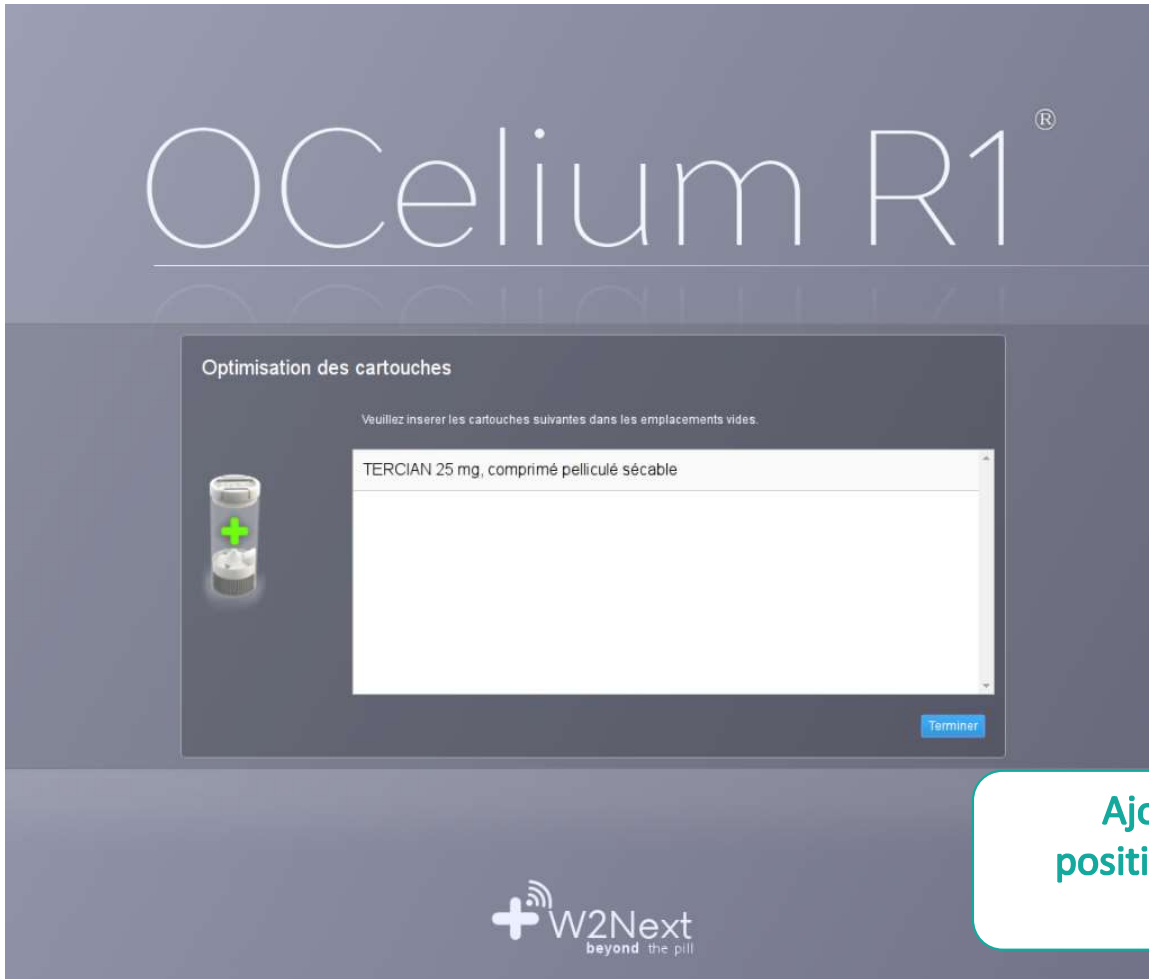

O Celium R1[®]

Optimisation des cartouches

Veuillez insérer les cartouches suivantes dans les emplacements vides.

TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable

Terminer

+ W2Next
beyond the pill

The screenshot shows a software interface for 'OCelium R1'. The main title is 'Optimisation des cartouches'. Below it, there is a instruction: 'Veuillez insérer les cartouches suivantes dans les emplacements vides.' A list of cartridges is shown, with the first one being 'TERCIAN 25 mg, comprimé pelliculé sécable'. There is a 'Terminer' button at the bottom right of the list. At the bottom of the interface, there is a logo for 'W2Next beyond the pill'.



Ajout des chargeurs qui se positionnent sur n'importe quel emplacement vide

Mdose – Automate Celia

Lancement de la production : positionnement du consommable Heb'Dose

OCelium R1[®]

Placez le Support
support : M-Dose

Une fois le consommable "semainier" disposé sur son support, rabattre le masque et pousser le tiroir jusqu'à sa position verrouillée.



Effectuer le remplissage manuellement Annuler le remplissage

 W2Next
beyond the pill



Mdose – Automate Celia

Le remplissage automatique du pilulier Heb'Dose

OCelium R1[®]

Activation de la cartouche.

Attendez pendant la dépose automatique du médicament demandé.

STAGID 700 mg, comprimé sécable

Restant: 5

lot: M2589

péremption: Mar. 30 avril 2019

Remplissage automatique :
Information sur la spécialité en cours
de chargement (la cartouche
s'illumine en vert)

▲ Visualiser les médicaments restants

MARGUERIE Hélène

Médicament	Nombre d'unités à déposer	Fraction	Liste des codes barres du médicament
DAFALGAN 500 mg, gélule	21	1	3267904 3400932679041 5553063 3400955530633
ZYRTEC 10 mg/ ml, solution buvable en gouttes	56	1	3417700 3400934177002

Dans le pilulier

En dehors du pilulier

Dépose manuelle

Liste des médicaments non préparés via les chargeurs :
En jaune le hors pilulier
En blanc dans le pilulier en semi-automatique
En bleu dans le pilulier en manuelle après ouverture du tiroir

Mdose – Automate Celia

Le remplissage semi-automatique ou manuel du pilulier Heb'Dose

Liste des médicaments à déposer :

Scanner le code barres du médicament pour commencer le remplissage :

MARGUERIE Vincent - 1771214118112345

	Médicament	Nombre d'unités à déposer	Fraction	Liste des codes barres du médicament	
<input type="checkbox"/>	MEDIATENSYL 60 mg, gélule	7	1	3609351 3400936093515	
<input type="checkbox"/>	DAFALGAN 500 mg, gélule	21	1	3267904 3400932679041 5553063 3400955530633	Boîte déjà délivrée

Liste des médicaments devant être préparés en semi-automatique et/ou manuelle

Mdose – Automate Celia

1^{ère} méthode : le remplissage semi-automatique du pilulier Heb'Dose



Remplissage semi-automatique :
Pour les fractionnés ou à faible
rotation



Mdose – Automate Celia

2^{ème} méthode : le remplissage manuel du pilulier Heb'Dose

Recevez manuellement le médicament déposé dans les cases du pilulier.

	Lun - 17/9	Mar - 18/9	Mer - 19/9	Jeu - 20/9	Ven - 21/9	Sam - 22/9	Dim - 23/9
soir	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0
mat	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Tratament complet:

MARGUERIE Hélène
 Traitement du 17-09-2018 au 23-09-2018 semaine 38
BETAHISTINE EG 8 mg
 lot: 123
 exp: Dim. 31 janvier 2021

Changer ce boî... Valider tout le dépôt... Valider... Valider une case

Dépose du médicament dans l'alvéole principale

Dépose du médicament dans l'alvéole d'exception

Recevez manuellement le médicament déposé dans les cases du pilulier.

	Lun - 17/9	Mar - 18/9	Mer - 19/9	Jeu - 20/9	Ven - 21/9	Sam - 22/9	Dim - 23/9
soir	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
mat	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1

Tratament complet:

MARGUERIE Hélène
 Traitement du 17-09-2018 au 23-09-2018 semaine 38
STAGID 700 mg
 lot: 159
 exp: Mer. 31 mars 2021

Changer ce boî... Valider tout le dépôt... Valider... Valider une case

Mdose – Automate Celia

Vérification du pilulier Heb'Dose préparé en automatique / semi-auto / manuel

	Jan - 17/9	Mar - 19/9	Mer - 19/9	Jeu - 20/9	Ven - 21/9	Sam - 22/9	Dim - 23/9			
coucher	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
soir	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)
midi	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
matin	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)

matin

1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
-------	-------	-------	-------

Ecran de vérification avant scellage


Traitement complet

MARGUERIE Héline (1/1)
Traitement du 17-09-2018 au 23-09-2018
semaine 38

- BETAHISTINE EG 8 mg
- PROPRANOLOL BIOGARAN 40 mg
- STAGID 700 mg
- TERCIAN 25 mg

Mdose – Automate Celia


Impression des étiquettes de scellage du pilulier Heb'Dose

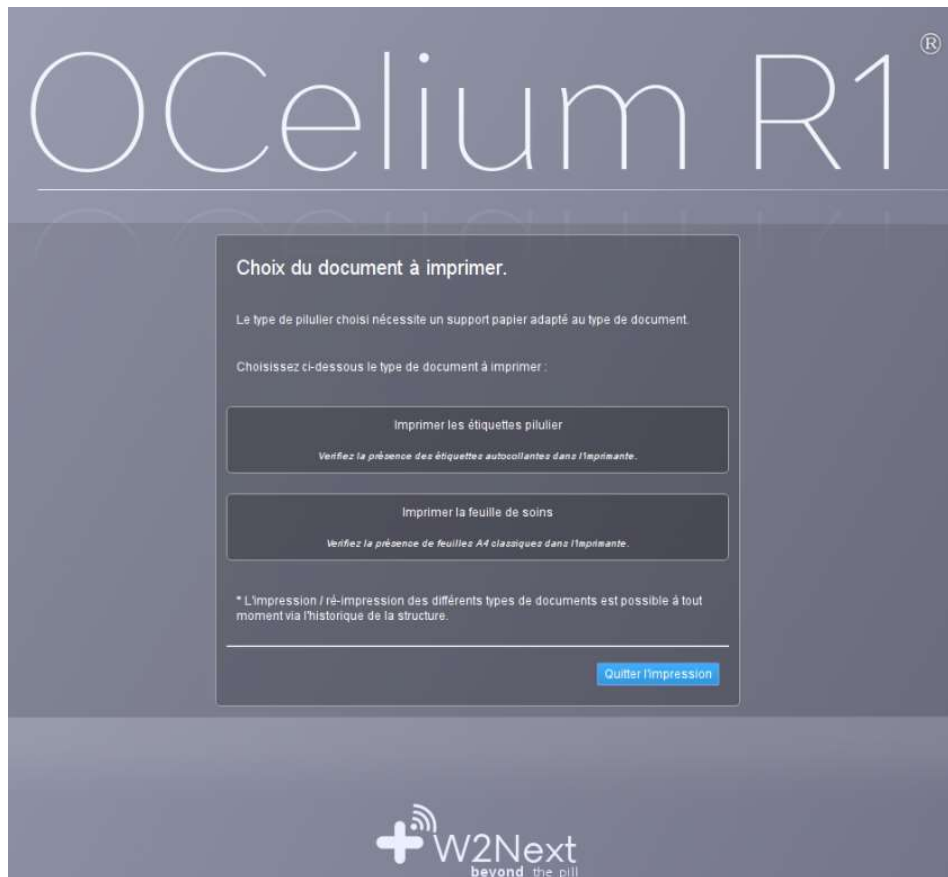

Edition de l'étiquette de scellage et feuille de soins

Résultat de la préparation :

Le pilulier Heb'Dose = 7 jours par 4 temps de prise détachables

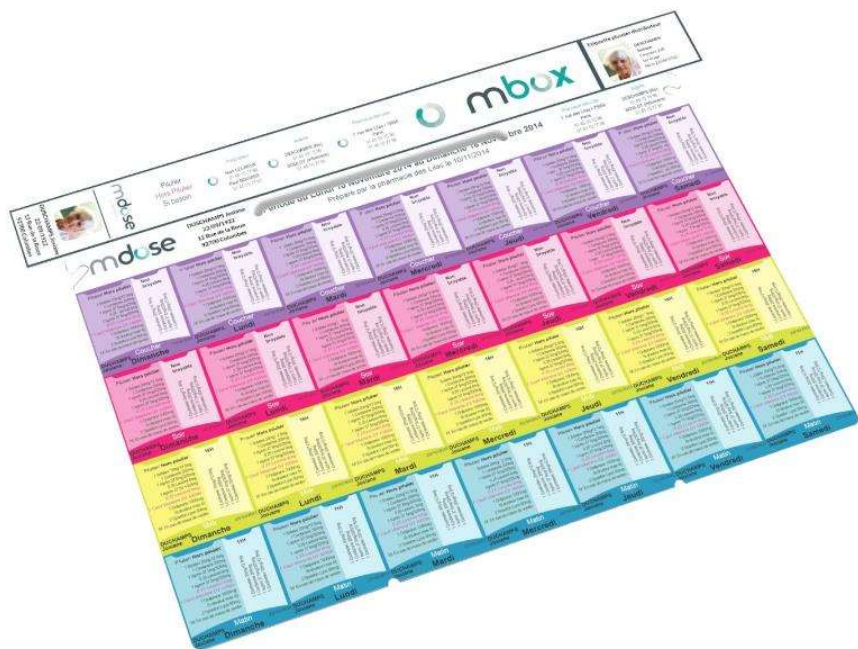

=



1 Journée de traitement



**10 route de
Brie-Comte-Robert
94520 Périgny-
sur-Yerres**

Info@mdose.fr

Tél. : 01.45.10.77.90

www.mdose-pda.fr

mdose
by Multiroir

www.mdose.fr